



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it

Sito Web: www.iistorriani.gov.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO

Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA ☎ 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE - IeFP Sezione associata "ALA PONZONE CIMINO"

Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA ☎ 037235179 - Fax: 0372457603

DESIGNAZIONE ADDETTI ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In qualità di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D. L.vo 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., in ossequio all'art. 18, 1° comma, lettera b) del D.L.vo in parola, previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori di questa attività (ex art. 50, comma 1, lettera c, D.Lgs n° 81/2008),

VERIFICATO

- che la collocazione del DAE presso la scrivente Istituzione Scolastica ne garantisce la piena disponibilità e la facilità di accesso;
- la presenza dei nominativi di chi è abilitato al BLS-D;
- la presenza del cartello di segnalazione del posto in cui è posizionato il defibrillatore;

DESIGNA

quali Addetti all'uso ed alla manutenzione del defibrillatore in dotazione all'Istituzione scolastica in epigrafe così come di seguito specificato:

NOMINATIVO ADDETTO

- 1) AT Solci Sandro**
- 2) AT Pighi Antonio**
- 3) CS De Rosa Anna**
- 4) CS Fracassi Silvia**
- 5) CS Villa Massimo**

Per lo svolgimento di tale incarico le SS.VV. dovranno tenere in efficienza operativa il DAE in conformità col piano di controllo e manutenzione che di seguito si specifica:

Controlli e manutenzione giornaliera:

- Assenza di segnali di malfunzionamento (es spia rossa, allarme sonoro);
- Presenza di spia lampeggiante;

Controlli e manutenzione settimanali:

- Verifica a vista dell'assenza di sporco o di contaminazione dell'unità e degli accessori. In tal caso provvedere alla pulizia del dispositivo e degli accessori;
- Verifica a vista dell'assenza di danneggiamenti dell'unità e degli accessori. In tal caso informare immediatamente il datore di lavoro per l'invio del dispositivo in assistenza;

Controlli e manutenzione mensili:

- Esecuzione autotest manuale;
- Controllo della presenza di:
 - almeno n. 2 pocket mask;
 - forbici taglia abiti;
 - almeno n. 2 rasoi;
 - almeno n. 5 confezioni di garze non sterili;
 - almeno n. 3 confezioni di guanti monouso.

In caso di soccorso il compito degli addetti sarà di attuare le misure di soccorso in conformità alla formazione ricevuta.

Si ricorda che tutti i componenti del Servizio Gestione Emergenze sono tenuti al segreto, in ordine alle situazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte.

Nel confermare la piena disponibilità della scrivente ad eventuali chiarimenti, si segnala che è possibile visionare il video tutorial all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=E-ZbBgsUz30> illustrante le attività di verifica periodica dei defibrillatori di cui sopra.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Mozzi